



Zaman deęerlidir...

Close Pad



Gümüş nitrat alařımlı elips balon sayesinde kayganlık, alerji ve enfeksiyon riski azalır.



Kum torbaları 6-8 saatlik sürede maksimum 4-6 kg basınç uygulayabilirken Close Pad 2-3 saatlik sürede 40cc hava uygulanarak 8.2 kg basınç uygular.



Her hasta tipine uygun ürün seçeneđi

Hasta konforu

Etkin zaman yönetimi

- ✓ Anjio sonrası hasta konforu sağlar
- ✓ Hastanede kalış süresini 4-6 saat azaltır
- ✓ Hastanın temel ihtiyaçlarını karşılamasını kolaylaştırır
- ✓ Hastane yatak sayısının verimli kullanılmasını sağlar.
- ✓ Sağlık personelinin iş gücü kaybını engeller.



Anjio sonrası kanama kontrolü yapılır.
Close Pad, cilt insizyon girişi belirlenerek konulur ve bantlar yapıştırılır.

Valften balona 50cc lik enjektör ile 40cc hava basılır.

2 saatlik hospitalizasyon süresinden sonra kanama kontrolü yapılarak
hasta taburcu edilebilir.

Bantlar hasta evine gittikten 6 saat sonra
kolonya ile yumuşatılıp çıkartılır.